

BUSTER Body Suit til kanin

Et ideelt alternativ til krage for kaniner etter kirurgi eller mindre skader. Gir optimal beskyttelse og komfort samtidig som den hindrer pasienten i å nå utsatte steder på kroppen for å oppnå raskere heling og restitusjon.

Perfekt til

- Post-operativ pleie
- Sårpleie
- Restitusjon etter kastrering
- Hudsykdommer

Sikrer

- Optimal trygghet
- Bevegelsesfrihet
- Stressfri håndtering
- Plass til innlegg for væskekontroll

Gir

- Hurtig restitusjon
- Mindre stress
- Mental velvære
- Komfortabel passform



Skann QR-kode
for å se video

Bruksanvisning

1. Plasser først hodet i drakten
2. Plasser ett framben om gangen i åpningene
3. Dra drakten så langt som mulig over kroppen
4. Plasser klaffen mellom bakbena og putt halen gjennom haleåpningen
5. Fest borrelåsklaffen på lenden og fest trykknappene



Trykknapper og borrelås for optimal sikkerhet og enkel montering

Utvidet haleåpning for når naturen kaller

Dobbelt stoff for innsetting og skifte av innlegg

TILGJENGELIG I 6 STØRRELSER

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Kaninens vekt i kg
274048	BUSTER Body Suit til kanin, 3XS, sort	1/pk	0,6 - 0,8
274049	BUSTER Body Suit til kanin, 2XS, sort	1/pk	0,8 - 1,5
274050	BUSTER Body Suit til kanin, XS, sort	1/pk	1,5 - 2,0
274057	BUSTER Body Suit til kanin, S, sort	1/pk	2,0 - 3,5
274058	BUSTER Body Suit til kanin, M, sort	1/pk	3,5 - 4,5
274059	BUSTER Body Suit til kanin, L, sort	1/pk	4,5 - 5,5
274078	BUSTER Body Suit til kanin, startpakke, 3XS-L, sort	6/pk	

