
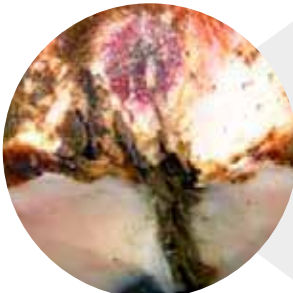


Hvordan forebygge og behandle klauvlidelser

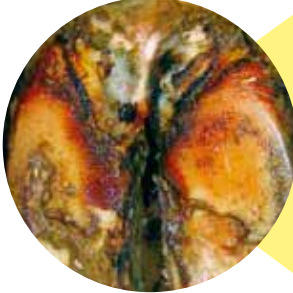

	Forebygging		Behandling		KRUUSE produkter
	► Digital dermatitt - Infeksiøs hudsykdom rundt klauven - Bakteriemiddel: Treponema - Høyeste risiko ved kalving og første måned med laktasjon	- God hygiene på gulv og i hvileområder - Spiseområde i egnet størrelse - Klauvskjæring og klauvbad to ganger i året - Engangsovertrekk til støvlene for alle besøkende - Rengjøring av støvler når man beveger seg fra én del av fjøset til en annen	- Vask og rens av klauver og infisert hud - Bruk salisylsyre-gele og klauvbandasje	- KRUUSE Hoof-Gel med Salicylic acid, varenr. 220402 - KRUUSE BOVIVET Hoof Bandage, varenr. 220420 - KRUUSE Vet-Flex, varenr. 160731 - Disposable boot covers, varenr. 260642 - KRUTEX nitrile examination gloves, varenr. 261134 - KRUUSE BOVIVET Hoof Dressing, varenr. 220425	
	► Interdigital dermatitt - Overfladisk interdigital infeksjon i huden - Opportunistiske bakterier i miljøet - Som oftest på bakbeina	- Hygiene - Klauvbad - Tørre hvileområder	- Rengjøring og desinfisering av klauv og hud - Salisylsyre-gele og bandasje	- KRUUSE Hoof-Gel med Salicylic acid, varenr. 220402 - KRUUSE BOVIVET Hoof Bandage, varenr. 220420 - KRUUSE Vet-Flex, varenr. 160731 - Disposable boot covers, varenr. 260642 - KRUTEX nitrile examination gloves, varenr. 261134 - KRUUSE BOVIVET Hoof Dressing, varenr. 220425	
	► Hælerosjon - Nedbryting og erosjon av klauvkapselen forårsaket av kjemikalier fra gjødselen - Opportunistiske bakterier fra kumiljøet, dvs. Nodosus-bakterier - Som oftest bakbeina - Mer utbredt hos eldre kyr	- Hygiene - rene og tørre gangområder - Klauvbad - Tørre hvileområder	- Rengjør klauvene - Skjær av alt skadet hornvev - Salisylsyre - Flytt kua til tørt underlag til det nye hornvevet er herdet	- Hoof knives, varenr. 220052-54 - KRUUSE Hoof-Gel med Salicylic acid, varenr. 220402 - KRUUSE BOVIVET Hoof Dressing, varenr. 220425 - KRUUSE Vet-Flex, varenr. 160731	
	► Fotråte - Akutt infeksjonssykdom - Fusobacterium necrophorum og flere andre bakterier er involvert - Akutt hevelse og halthet - Mulig feber og anoreksi	- Hygiene - Rene og tørre gangområder - Tørre beitemarker, spesielt ved inngangspartier - Fjern skarpe gjenstander som kan skade klauvene	- Systemiske antibiotika - NSAIDS - Rengjøring og desinfisering av klauv og hud - Antibakteriell bandasje	- KRUUSE Hoof-Gel med Salicylic acid, varenr. 220402 - Cotton polster, varenr. 160133 - KRUUSE Vet-Flex, varenr. 160731 - Disposable boot covers, varenr. 260642 - KRUTEX nitrile examination gloves, varenr. 261134	
	► Sålesår - Sårdannelse i sålen - Risiko for påfølgende infeksjon i klauvbein, ledd og sener - Tråkket på et fremmedlegeme - Økt risiko i overgrodde/uskårne hover - Svært smertefullt	- Halvårlig skjæring av klauver - God ernæring for å unngå ruminal acidose og laminititt som svekker klauvene - Hold gangområder fri for steiner og andre fremmedlegemer - God pleie av innhegningen	- Fjern skadet hornvev - Rengjør og desinfiser såret - Bruk klauvblokk på den andre klauvdelen for å unngå belastning på den såre klauvdelen - Flytt til et tørt område med få kyr for å minimere stress - NSAIDS i akutt fase	- Hoof knives, varenr. 220052-54 - Trimming discs, varenr. 220064 - KRUUSE Hoof Glue, varenr. 220600-02 - Hoof blocks/shoes, varenr. 220490-91	
	► Sykdom i den hvite linjen - Løsning i den hvite linjen i klauven - Ofte forbundet med laminititt og svekket forbindelse mellom klauvkapselen og klauvbeinet - Smuss i en skadet hvit linje kan føre til abscess - Gir kroniske endringer i klauven	- Halvårlig skjæring av klauver - God ernæring for å unngå ruminal acidose og laminititt som svekker klauvene	- Korrigere ubalanse i metabolismen - Skjær klauvene - Fjern fremmedlegemer som sitter fast i den hvite linjen - Flytt kua til et sted med mykt underlag	- ReCovin Rumen Acidosis Paste, varenr. 310763 - Hoof knives, varenr. 220052-54 - Hoof trimming discs, varenr. 220064	