



Antibac

Desinfektionsservett för ytor IPA

Desinfektionsservett



Antibac Desinfektionsservett för ytor är en mjuk desinfektionsservett som effektivt minskar risken för smittspridning. Produkten är avsedd för desinfektion av "tagtytor" som t.ex. handtag, bord, kranar etc. men lämpar sig även för desinfektion av t.ex. toalettsitsar.

Produkten består av ca 45 vol% IPA samt tensid som rengör ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 60 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN14476 (Vacciniavirus/höjeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktegenskaper

Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. Corona, Hepatit B, C och HIV.

Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka

Innehåller tensid som gör att ytan inte behöver rengöras innan desinfektion

Passar för desinfektion av mindre ytor som t.ex. dörrhandtag, toalettsitsar, bord, kranar och andra tagtytor

Bruksanvisning

Gör så här/Dosering:

- Tag så många servetter som krävs för att hålla ytan fuktig under hela kontakttiden (se etiketten för kontakttid)
- Bearbeta ytan upprepade gånger.
- Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverknings tiden och låt lufttorka.

Tillverkningsland

FRANKRIKE

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

6 x 150 ml

603051

7054956030515

7054957030514



Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.